

EquiAirLite

Quick Start

Modus 1

Dieser Modus aktiviert den Doppel-Membran-Betrieb. Beide Membranen arbeiten gleichzeitig, und die LED leuchtet durchgehend.

Modus 3

Dies aktiviert den Intervall-Modus. Der Vernebler arbeitet in bestimmten Intervallen, und die LED blinkt entsprechend.



Einschalten

1x Kurzes Klicken (Modus 1)
2x Klicken (Modus 2)
3x Klicken (Modus 3)
4x Klicken (Aus)

Modus 2

Hier schalten Sie in den Wechsel-Modus. Die linke und rechte Membran arbeiten abwechselnd. Die LEDs leuchten abwechselnd links und rechts.

Ausschalten

Halten Sie den Knopf 3 Sekunden lang gedrückt.

Ein längeres Gedrückthalten des Knopfes (und kontinuierliches Halten) aktiviert den Reinigungsmodus beider Düsen. Beim Loslassen des Knopfes schaltet sich der Vernebler dann aus.