

EquiAirLite

Quick Start

Modus 1

Dieser Modus aktiviert den Doppel-Membran-Betrieb. Beide Membranen arbeiten gleichzeitig, und alle 3 LEDs leuchten durchgehend.

Modus 3

Dies aktiviert den Intervall-Modus. Der Vernebler arbeitet in festen Zeitabständen, und die mittlere LED blinkt entsprechend.



Einschalten

1x Kurzes Klicken (Modus 1)
2x Klicken (Modus 2)
3x Klicken (Modus 3)
4x Klicken (Aus)



Modus 2

Hier schalten Sie in den Wechsel-Modus. Die linke und rechte Membran arbeiten abwechselnd. Die LEDs leuchten abwechselnd links und rechts. Mittlere LED leuchtet.



Ausschalten

Drücken durch alle Modi durch. Die LED-Anzeige erlischt.